

---

# Reinigingspistool



## ONMISBAAR IN ZIEKENHUIS, LABORATORIUM EN PRIVÉ KLINIEKEN

Het Selecta spuitpistool is het ideale werktuig voor het reinigen van laboratorium glaswerk, pipetten, spuitten, katheters, endoscopen, cytoscopen, canules en een variëteit aan andere instrumenten die gebruikt worden in ziekenhuizen, laboratoria, klinieken en medische praktijken, met andere woorden overal waar reinheid en hygiëne hoog in het vaandel staan.



Het Selecta spuitpistool gebruikt of water of perslucht. Dit betekent dat het reinigingsproces snel, efficiënt en daardoor kostenbesparend is.

Het spuitpistool heeft een nieuw intern flow regel mechanisme. Het maakt het mogelijk om op vlotte en eenvoudige wijze de hoeveelheid water of lucht te regelen d.m.v. het indrukken van de hendel.

De gewenste maximale hoeveelheid water of lucht kan ingesteld worden m.b.v. de schroef die onder de hendel zit.

Spuitpistool 240396

## MET CONUS EN ZONDER SLANG AANSLUITING



Met PVC slang

### PVC slang

Lengte slang	1,5 m	3 m
Art. nr.	240401	240403



Met RVS slang

### RVS slang

Lengte slang	1,6 m
Art. nr.	240402

## DE PRAKTISCHE SELECTA TAFELROZET

De tafelrozet, een holle cilinder, maakt het mogelijk om het Selecta reinigingspistool te installeren in de spoelbak of op het werkblad. Het reinigingspistool is dan binnen handbereik. De slang met respectievelijk de aansluiting voor water of lucht wordt onzichtbaar opgeborgen onder het werkblad of de gootsteen.



Tafelrozet met 54 mm moer 240400

Het complete Selecta reinigingspistool bestaat uit een pistool, slang, wateraansluiting, pistoolhouder en montagemateriaal. Het pistool is in de volgende uitvoeringen verkrijgbaar:

Complete set Aansluiting	Standaard set 8 hulpstukken 1-8
1/2"	240397
3/4"	240398

## EEN ASSORTIMENT HULPSTUKKEN GESCHIKT VOOR ALLE DOELEINDEN.

Spoelen, zuigen en drogen voor verschillende toepassingen wordt mogelijk gemaakt door een assortiment van 8 hulpstukken. De standaard set van 8 hulpstukken wordt geleverd met een stabiel opslag rek dat aan de muur bevestigd kan worden. Hierdoor bevinden alle hulpstukken zich binnen handbereik.

Toebehoren set 240399



	Geschikt voor	Artikelnummer
①	voor katheters, ventielen etc.	240406
②	voor afzuigslangen	240407
③	douche voor vlakke en holle ruimtes	240408
④	voor spuiten en canules met recordconus	240409
⑤	voor meet en bloedpipetten	240410
⑥	voor spuiten en canules met Luer-Lock	240411
⑦	voor flessen en Erlenmeyer- kolven	240412
⑧	Waterstraalpomp voor het afzuigen van hoekstukken en holle ruimtes	240413

Het spuitpistool heeft een nieuw intern flow regel mechanisme.  
Het maakt het mogelijk om op vlotte en eenvoudige wijze de hoeveelheid water of lucht te regelen d.m.v. het indrukken van de hendel.  
De gewenste maximale hoeveelheid water of lucht kan ingesteld worden m.b.v. de schroef die onder de hendel zit.



Alle opzetstukken kunnen eenvoudig op het reinigingspistool worden aangesloten door ze op de veiligheidskegel aan het uiteinde van de punt aan het pistool te plaatsen. Zelfs bij hoge druk is deze bevestiging betrouwbaar.  
De pistoolgreep is thermisch geïsoleerd.



Het Selecta reinigingspistool is binnen zeer korte tijd gereed voor gebruik:

1. Het opslag rek met de hulpstukken wordt aan de muur bij de gootsteen of het werkgebied bevestigd.
2. De slang wordt op de kraan aangesloten m.b.v. een kraanwartel (maten: 3/4", 1/2").

Indien het pistool gebruikt dient te maken van perslucht, dient de slang aangesloten te worden op de perslucht voorziening d.m.v. een geschikte connector (kan niet geleverd worden door Van Vliet Medical Supply).



Aansluiting 1/2"

Aansluiting 3/4"

**Aansluiting**

1/2"

3/4"

**Art. nr.**

240404

240405

Van Vliet Medical Supply B.V.

Antennestraat 60

1322 AS Almere

T +31 (0)36 547 21 50

F +31 (0)36 547 21 55

E [info@vanvlietmedical.nl](mailto:info@vanvlietmedical.nl)

I [www.vanvlietmedical.nl](http://www.vanvlietmedical.nl)

